

SÅDAN BRUGES GIFTSUGER®

ILLUSTRATIONER FOR ANVENDELSE

1



2



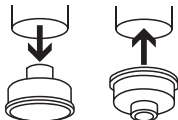
2+



3



4

BRUG FOR MERE
INFORMATION?

VENDBART MUNDSTYKKE



giftsuger®

Fjerner straks al ubehag · Klinisk testet



INGEN KEMIKALIER - GENANVENDELIG

DANSK

HVORDAN BRUGER JEG GIFTSUGER®

ANVENDELSESFORMÅL

GIFTSUGER® er et genanvendeligt sugeværktøj beregnet til øjeblikkeligt at lindre symptomer som kløe, hævelse og smerter fra insektbid og stik.

Når du fjerner irritationen, holder din krop op med at producere den reaktion, som forårsager symptomer som kløe og hævelse. For at opnå det bedste resultat benyt GIFTSUGER® hurtigst muligt efter insektstik eller -bid.

TRIN (1)

Skub håndtagene ned. Placer sugeværktøjet på insektstikket.

TRIN (2)

Træk forsigtigt håndtagene opad indtil du mærker et sug.

TRIN (2+)

Sug i 10-20 sekunder.

TRIN (3)

Skub håndtagene nedad for at frigive suget.

GENTAG STEP 1-3 EFTER BEHOV

TRIN (4) VENDBART MUNDSTYKKE

Vend mundstykket for at kunne suge på mindre områder, såsom fingre eller tæer.

KUN TIL FØRSTEHJÆLP

I tilfælde af en allergisk reaktion eller alvorligt stik/bid, søg omgående lægehjælp.

FOR BØRN ELLER SENSITIV HUD

Træk håndtagene halvvejs op eller mindre. Hold suget i 5-10 sekunder. Børn eller områder med sensitiv hud (ansigt, nakke eller ører) kræver mindre sug for at fjerne irritationen grundet den sensitive/tyndere hud.

GIFTSUGER® indeholder ingen kemikalier eller cremer. GIFTSUGER® kan bruges af mennesker i alle aldre. Mindre børn bør kun anvende GIFTSUGER® under opsyn af voksne.

SKRAB BRODDEN UD

Benyt siden af håndtagene til at skrabe brodden ud efter et stik.

RENGØRING

Vask det aftagelige mundstykke med sæbevand eller en vådserviet mellem og efter brug.

GIFTSUGER® har ingen udløbsdato, og kan derfor genanvendes så længe et vakuum kan genereres.

ADVARSEL! PRODUKTET MÅ IKKE ANVENDES AF

Personer med nedsat evne til at størkne blod såsom patienter med hæmofili eller i antikoagulerende behandling - Personer med kendt vaskulitis såsom Schönlein Henochs purpura eller personer med skrøbelige kapillærer såsom Ehlers-Danlos syndrom - Personer med buløs hudsygdom som pemfigoider. Må ikke anvendes over inficeret, sårdannet hud eller hud med betydelig eksem.

KVÆLNINGSFARE: Indeholder mindre dele. GIFTSUGER® kan efterlade midlertidige mærker på huden. STOP med at suge hvis du oplever smerte.

LEGAL PRODUCENT



Bug Bite Thing Europe Aps, Agern Allé 5A,
DK-2970 Hørsholm

Alvorlige hændelser skal indrapporteres direkte til den legale producent af dette medicinske udstyr og den relevante myndighed: Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, www.dkma.dk

DESIGNET OG PRODUCERET I DANMARK



LOT HVID 240102, SORT 240104, PINK 240105